



**Technical File für Forni-Leibgürtel Ref: 41613 - 41619**

<b>Artikelnummer/ Référence</b>	41613 - 41619, Detailaufstellung siehe Masse / Détails ; voir tableau ci-dessous				
<b>Bezeichnung/ Désignation</b>	Leibgürtel 3-Bahnen Bandage abdominale 3-bandes				
<b>Beschreibung/ Description</b>	<b>Leibgürtel 3-Bahnen, 23 cm</b> <b>Bandage abdominale 3-bandes, 23 cm</b>				
<b>Eigenschaften/ Propriétés</b>	<p>Stützend durch starke Kompression, die Bandage ist leicht, mittels Klettverschlüssen anzulegen. Dank den 3 Bahnen (je 75 mm) passt sich die Bandage optimal dem Thorax an. Die 3 elastischen Bahnen aus Elasthan sind mit Polyester umwickelt. Im vorderen Bereich ist ein Stück Foam eingenäht. Innenseite glatt, Aussenseite aus Velours damit der Klett haften kann.</p> <p>Bon soutien et forte compression, la ceinture est facile à mettre, grâce de fermetures velcro, les 3 bandes (chaque de 75 mm) permettent une meilleure adaptation au thorax. Les bandes élastiques en élasthanne sont recouvertes de polyester. A la partie en avant se trouve une pièce de mousse qui est lisse sur la partie intérieure et un velours à l'extérieure pour la fermeture velcro.</p>				
<b>Sterilität/ Stérilité</b>	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt non stérile                                      emb. simple stérile                                      emb. double stérile				
<b>Material/ Zusammensetzung</b> <i>Matériel/ Composistion</i>	65 % Polyester, 12 % Polyamid & 23 % Elasthan (latexfree) 65 % polyester, 12 % polyamide & 23 % élasthanne (sans latex)				
<b>Farbe/ couleur</b>	Weiss/ blanc				
<b>Masse / Kapazität</b> <i>Dimensions/ Capacité</i> <b>GTIN</b>	<b>Ref</b>	<b>Grösse/ Taille</b>	<b>Masse/ Mesures</b>	<b>GTIN</b>	<b>Gewicht/ poids</b>
	41613	S	75 – 95 cm	7640160162588	190 gr
	41615	M	85 – 105 cm	7640160162595	200 gr
	41617	L	100 – 120 cm	7640160162601	220 gr
	41619	X-L	110 – 130 cm	7640160162618	240 gr



<b>Reinigung/ Nettoyage</b>	Handwäsche bis 30°C, immer alle Velcros vor dem Waschen schliessen, nicht im Tumbler trocknen. Lavable à la main jusqu'à 30°C ; fermer toujours tous les velcros avant lavage, sécher à l'aire libre						
<b>Verpackung/ Emballage</b>	Karton à 1 Stück/ carton de 1 pièce						
<b>Markierung/ Marquage</b>	CE						
<b>Lieferant / Hersteller</b> <i>Fournisseur/ Fabricant</i>	Intex SA ES-Andoain						
<b>Medizinproduktklasse</b> <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
<b>e-class</b>	34-20-02-90						
<b>Mi-Gel Code/ Code Lima</b>	05.11.10.00.1						
<b>UMDNS-Code</b>	10-279						
<b>Enthält/ Contient</b>	<input type="checkbox"/> Latex			<input type="checkbox"/> DEHP			
<b>Bioburden-Test vorhanden</b> <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja			<input checked="" type="checkbox"/> Nein			
<b>Notified Body / Nr.</b>	n/a						
<b>Verwendungszweck</b> <i>Utilisation prévue</i>	Empfohlen nach post-operativen Eingriffen im Thorax- oder Lumbalbereich, zur Unterstützung bei Rückenschmerzen Protection et maintien du thorax. Recommandé après intervention post-opératoire du thorax ou lumbago, pour soutenir en cas de douleurs dorsales						
<b>Anwender</b> <i>Utilisateur</i>	Medizinisches Fachpersonal Personnel médical						
<b>Lagerbedingungen</b> <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, zwischen 8 und 30°C Stocker au sec, entre 8 et 30°C						
<b>Einwegprodukt</b> <i>Produit d'usage unique</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/ oui			<input type="checkbox"/> Nein/ non pro Patient/ par patient			
<b>Sterilisierbares Produkt</b> <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/ oui			<input checked="" type="checkbox"/> Nein/ non			
<b>Sterilisierbar mit</b> <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO		<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen		<input type="checkbox"/> Dampf		
<b>Haltbarkeit/ Durabilité</b>	10 Jahre nach Herstellungsdatum 10 ans après date de production						
<b>Zolltarifnummer</b> <i>Numéro tarifaire douanier</i>	9021.1000						

