



Technical File für Forni-Beinschienen/ Attelles de genou Ref: 60002.S – 60005.S

Artikelnummer/ Référence	60002.S – 60005.S
Bezeichnung/ Désignation	Forni-Beinschiene, gerade, mit Silikon Forni-Attelles pour le genou, droite, avec silicone
Beschreibung/ Description	<p>Beinschiene mit je zwei herausnehmbaren Aluschielen auf jeder Seite und eine auf der Beinrückseite, sowie diversen Klettverschlüssen. Zwei eingenähte Silikonstreifen auf der Frottée-Innenseite verhindern das Abrutschen der Beinschiene. Zusätzlich verfügt jede Beinschiene über ein 2.5 x 50 cm langes, schmales Band, das zur Fixierung eines Kühlbeutels dient.</p> <p>Attelles pour le genou avec deux attelles enlevables en aluminium de chaque côté, ainsi qu'une à l'arrière de la jambe et différentes fermetures velcro. Deux bandelettes en silicone cousues sur la partie frottée évitent le glissement de l'attelle. En plus chaque attelle a une bandelette velours d'environ 2.5 x 50 cm pour la fixation d'une poche de glace.</p>
Eigenschaften/ Propriétés	<p>Leicht anzuziehen, mit 6 verstellbaren Klettverschlüssen leicht zu schliessen, regulierbar; beidseitig verwendbar; angenehmer Tragkomfort, rutscht nicht, dank der Silikonstreifen</p> <p>A mettre facilement, ajustable avec 6 fermetures velcro, facile à fermer et ajuster; utilisable pour les deux côtés ; agréable à porter ; ne glisse pas, grâce aux bandelettes de silicone</p>
Achtung/ Attention	<p>Die rutschfesten Knieschienen nicht direkt auf der Haut verwenden. Verbrennungsgefahr! Hosen, Leggings, Trainingsanzug oder einen Trikotstrumpf darunterziehen.</p> <p>Ne pas mettre les attelles de genoux antiglisse (avec silicone) directement sur la peau. Risque de brûlures ! Mettre sur un pantalon, leggings, training, ou un bas tubulaire.</p>



Einwegprodukt <i>Produit d'usage unique</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, pro Patient <input type="checkbox"/> Nein/ non <input checked="" type="checkbox"/> Oui, par patient
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/ oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/ non
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen <input type="checkbox"/> Dampf/ vapeur
Haltbarkeit/ Durabilité	5 Jahre nach Herstellungsdatum 5 ans après date de production
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	9021.1000

