



EMODIAL®

EXIT-POCKET® WP



EMODIAL®

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com

Importer & CH-REP:

fm

forni medical gmbh

Produkte für den Spital- und Arztbedarf

Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | info@fornimedical.ch
www.fornimedical.ch

Ref. IT0013-FM Rev. 01/2022

**Wasserdichter Beutel
für den Katheterschutz**

EXIT-POCKET® WP

Wasserdichter Beutel für den Katheterschutz

BESCHREIBUNG

EXIT-POCKET WP ist ein wasserdichter, an vier Seiten geschlossener Beutel mit einer Klebeöffnung zur Befestigung auf der Haut.

INDIKATION

Einschliessung der Katheterenden bei der Patientenhigiene (Baden und Duschen) und bei Wasseraktivitäten (Tauchen im Meer oder Schwimmbad).

ZWECK

Entwickelt, um die Austrittsstelle des Katheters vor Kontakt mit Wasser zu schützen. Der Beutel ist bei guter Positionierung komplett wasserdicht und schützt damit die Austrittsstelle des Katheters vor Wasser, um mikrobielle Kontaminationen zu vermeiden.

VORTEILE

- Schnelles, einfaches Anbringen.
- Bequeme Passform.
- Steigert die Lebensqualität katheterisierter Patienten.
- Einfache und schnelle Entfernung.



GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Führen Sie die Katheterenden oder die sie enthaltende Schutzvorrichtung in das Beutelloch ein.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebeöffnung.
3. Platzieren Sie den unteren Rand der Klebeöffnung in Übereinstimmung mit dem unteren Rand der Austrittsstelle oder des Verbandes, falls vorhanden, und kleben Sie ihn von unten nach oben vollständig auf, dabei die Bildung von Falten oder Luftblasen vermeiden.
4. Warten Sie 10 Minuten nach der Anwendung des Beutels.
5. Duschen oder baden Sie und achten Sie dabei darauf, dass Sie den Bereich der Klebeflächen nicht reiben.
6. Tragen Sie den Beutel nicht länger als 4 Stunden.
7. Zum Entfernen ziehen Sie vorsichtig einen kleinen Klebestreifen von der Haut ab und ziehen vorsichtig in kleinen Bewegungen nach oben, dabei darauf achten, nicht an den Katheterenden zu ziehen.



BESTELLDATEN

| CODE | MASSE (cm) | | | INDIKATION | STK. / SCHACHTEL |
|------------|------------|------|----|----------------|------------------|
| | Öffnung | h | IA | | |
| S2005H/WP | ø 5 | 11 | 22 | Bad und Dusche | 50 |
| S2011H/WP | 10 x 9 | 13 | 26 | Bad und Dusche | 50 |
| S2013HL/WP | 13 x 11 | 17,6 | 30 | Bad und Dusche | 50 |
| S2013H/WP | 11 x 13 | 15,6 | 30 | Bad und Dusche | 50 |

KLASSIFIKATION • MEDIZINPRODUKT CE

STERILISATION • UNSTERIL



• ZUR EINMALIGEN VERWENDUNG