



EMODIAL®

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com

Importer & CH-REP:

fm **forni medical gmbh**
Produkte für den Spital- und Arztbedarf

Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | info@fornimedical.ch
www.fornimedical.ch

CE
0373

Ref. DE004-FM Rev. 07/2019



EMODIAL®

SOVAN®

Fistelverband



SOVAN®

BESCHREIBUNG

SOVAN ist ein hochabsorbierendes, zweilagiges hämostatisches Pad auf einem hypoallergenen, luftdurchlässigen Pflaster.

Auch für Patienten geeignet, die eine intravenöse Behandlung und Bluttransfusion benötigen.

VERWENDUNGSZWECK

Komprimierende hämostatische Wirkung, speziell für die Pflege von arteriovenösen Zugängen. Zur Verwendung nach der Dialyse, nachdem die Fistelnadeln entfernt wurden.

VERWENDUNGSNUTZEN

Entwickelt, um dank der Kompression der Punktionsstellen Blutungen zu stoppen und das Blutungsrisiko zu verringern. Wirkt gleichzeitig als Barriere gegen das Infektionsrisiko. Die nicht-anhaftende, biokompatible Schicht des Pads haftet nicht an der Haut, **sodass das Gerinnsel nicht entfernt werden muss und die Gefahr von Blutungen nicht besteht.** Das Pflaster sorgt dafür, dass das Pad in Position bleibt.



Fistelverband

GEBRAUCHSANWEISUNG

1 Ziehen Sie das Schutzpapier ab und befestigen Sie die erste Hälfte des Verbands auf der Haut.



2 Legen Sie das Pad auf die Einstichstelle, drücken Sie und entfernen Sie die Nadel.



3 Entfernen Sie die zweite Hälfte des Papiers und fixieren Sie die andere Hälfte des Verbandes fest auf der Haut. Bis zum Erreichen der Hämostase in Position halten.



BESTELLDATEN

CODE	KLASSIFIZIERUNG	PAD	STK./ BEUTEL	BEUTEL/ SCHACHTEL
	cm	cm		
S0074	15 x 5	Ø 2,6	1	500
S0075			2	500
S0079	10 x 5		2	500

KLASSIFIZIERUNG • CE0373 MEDIZINPRODUKT
STERILISIERUNG • GAMMA-STRAHLEN