



EMODIAL®

Via Finati, 4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com

Importer & CH-REP:

fm

forni medical gmbh

Produkte für den Spital- und Arztbedarf

Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf
Tel. +41 (0)71642 35 68 | info@fornimedical.ch
www.fornimedical.ch


Ref.DE001 - Rev. 09/2019



EMODIAL®

DIAFIX®

Fistel-Druckband

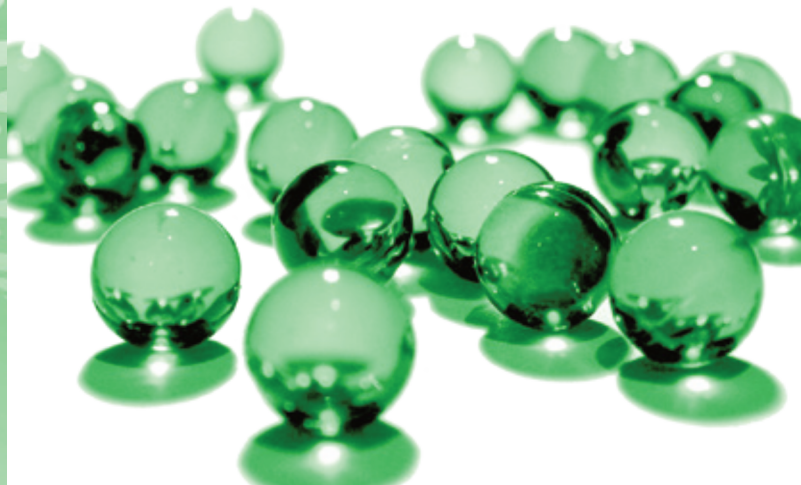

BESCHREIBUNG

AV-Fistel-Druckband ohne absorbierenden Pad.

INDIKATION


Kompressionsbedingte Blutstillung der Punktionsstellen nach Entfernung der Dialysekanülen am arteriovenösen Shunt.

Auch geeignet für Patienten die intravenöse Therapie oder Bluttransfusionen erhalten.

ZWECK

Entwickelt um:

- Blutungen zu stoppen und das Blutungsrisiko, über Kompression auf die Punktionsstellen, zu verringern.
- Den Beginn von Komplikationen des Gefäßzugangs durch subkutane Blutungen, die die Entwicklung von intravaskulären Blutgerinnsel begünstigen, verringern.
- Okklusion der Fistel durch nicht regulierbare Kompression zu verhindern.

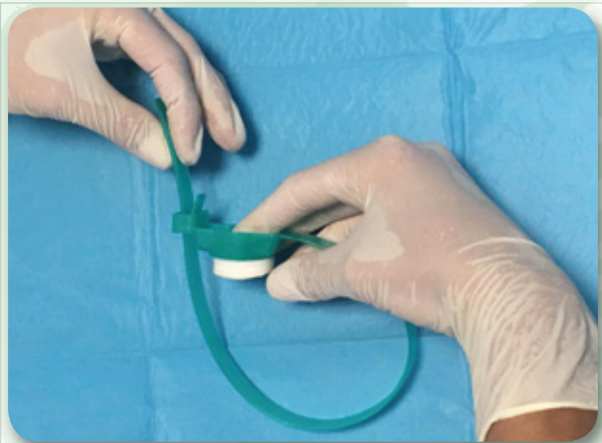

GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1 Platzieren Sie einen Tupfer/Pad auf die Punktionsstelle über der Kanüle und halten Sie diesen mit dem Daumen.
- 2 Ziehen Sie das Band an.
- 3 Entfernen Sie die Kanüle.
- 4 Justieren Sie die Spannung des Bandes um die optimale Fistel-Kompression zu erzielen und die Blutung zu stoppen.
- 5 Entfernen Sie das Druckband sobald Sie die Blutstillung erreicht haben.
- 6 Wiederholen Sie die Prozedur für die zweite Punktionsstelle.



BESTELLDATEN

Daten und technische Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

ART. NR.	Zertifikat	BAND (cm)			PAD (cm)	STÜCK / PKT.	PKT. / BOX
		Farbe	L	H			
B0088/N/VND	CE	GRÜN	38	1,5	no	Bulk	500

KLASSIFIKATION • KLASSE I MEDIZINPRODUKT
BIOKOMPATIBILITÄT • GEMÄSS UNI EN ISO 10993
STERILISATION • UNSTERIL OHNE PAD
VERFALLDATUM • N/A



• ZUR EINMALIGEN VERWENDUNG