



EMODIAL®

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com

Importer & CH-REP:

fm **forni medical gmbh**
Produits pour Hôpitaux et Médecins

Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | info@fornimedical.ch
www.fornimedical.ch

CE
0373

Ref. DE002-FM - Rev. 07/2019



EMODIAL®

BETAFIX®

Fistelverband



BETAFIX®

Fistelverband

BESCHREIBUNG

Elastischer Fistelverband mit zweilagigem, hochabsorbierendem Pad und Pflaster für eine bessere Dichtigkeit. Auch für Patienten geeignet, die eine intravenöse Behandlung und Bluttransfusion benötigen.

VERWENDUNGSZWECK

Post-Dialyse-Verband zur Blutstillung nach Entfernung der Fistelnadeln.

VERWENDUNGSNUTZEN

Entwickelt, um dank der Kompression der Punktionsstellen Blutungen zu stoppen und das Blutungsrisiko zu verringern. Wirkt gleichzeitig als Barriere gegen das Infektionsrisiko. Die nicht-anhaftende, biokompatible Schicht des Pads haftet nicht an der Haut, **sodass das Gerinnsel nicht entfernt werden muss und die Gefahr von Blutungen nicht besteht.**

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Rollen Sie den ersten Teil des Verbandes mit dem Pad ab.
2. Legen Sie das Pad auf die Einstichstelle.
3. Ziehen Sie den Verband ausreichend fest, um die Blutung zu stoppen.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie und fixieren Sie den Verband mit dem Pflaster.



BESTELLDATEN

CODE	VERBAND			PAD	STK. / BEUTEL	BEUTEL / SCHACHTEL
	Farbe	Gesamtlänge cm	Höhe cm	Masse cm		
S0029	WEISS	50±10%	6	Ø 2,6	1	500
S0030	WEISS			Ø 2,6	2	300

KLASSIFIZIERUNG • MEDIZINPRODUKT CE0373
STERILISIERUNG • GAMMA-STRAHLEN