



**EMODIAL®**

Via Finati, 4-4A - Ferrara (ITALY)

Tel. (+39) 0532 978198 - Fax (+39) 0532 978414

[www.emodial.com](http://www.emodial.com) - [info@emodial.com](mailto:info@emodial.com)

Importer & CH-REP:

*fm* **forni medical gmbh**  
Produits pour Hôpitaux et Médecins

Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf  
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | [info@fornimedical.ch](mailto:info@fornimedical.ch)  
[www.fornimedical.ch](http://www.fornimedical.ch)

Ref. DE003-FM Rev. 07/2019



**EMODIAL®**

**EMOSTAN®**

**Fistelpad**



# EMOSTAN®

## FISTELPAD

### BESCHREIBUNG

EMOSTAN® ist ein hochabsorbierendes Pad mit komprimierender hämostatischer Wirkung, das speziell für die Pflege von arteriovenösen Zugängen nach der Dialyse verwendet wird, nachdem die Fistelnadeln entfernt wurden.

Auch für Patienten geeignet, die eine intravenöse Behandlung und Bluttransfusion benötigen.


### VERWENDUNGSZWECK

Post-Dialyse-Verband zur Blutstillung nach Entfernung der Fistelnadeln.

### VERWENDUNGSNUTZEN

Entwickelt, um dank der Kompression der Punktionsstellen Blutungen zu stoppen und das Blutungsrisiko zu verringern. Wirkt gleichzeitig als Barriere gegen das Infektionsrisiko.

Die nicht-anhaftende, biokompatible Schicht des Pads haftet nicht an der Haut und **garantiert eine atraumatische Entfernung**.

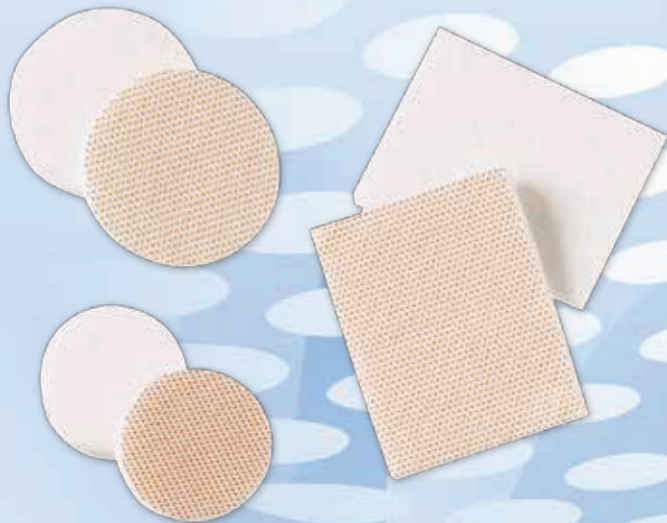

### GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1 Platzieren Sie den Pad auf der Einstichstelle und halten Sie diesen mit dem Daumen.



- 2 Entfernen Sie die Nadel und drücken Sie für eine angemessene Zeit, um die Blutung zu stoppen.



### BESTELLDATEN

CODE			STK. / BEUTEL	BEUTEL / SCHACHEL
	Masse cm	Dicke mm		
S0210	Ø 2,6	0,7±10%	2	500
S0211	Ø 3,5		2	500
S0212	3,5 X 4,5		2	300

KLASSIFIZIERUNG MEDIZINPRODUKT CE0373  
STERILISIERUNG GAMMA-STRAHLEN