



EMODIAL®

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com

Importer & CH-REP:

fm **forni medical gmbh**
Produits pour Hôpitaux et Médecins

Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | info@fornimedical.ch
www.fornimedical.ch

CE
0373

Ref. FR002-FM - Rev. 07/2019



EMODIAL®

BETAFIX®

Bandage pour fistule



BETAFIX®

DESCRIPTION

Pansement élastique pour fistule, muni d'un tampon bicouche hautement absorbant et d'un adhésif pour une meilleure étanchéité.

Convient également aux patients qui ont besoin d'un traitement intraveineux et d'une transfusion sanguine.

UTILISATION PRÉVUE

Pansement post-dialyse pour arrêter le saignement après le retrait des aiguilles de la fistule.

OBJECTIF D'UTILISATION

Conçu pour arrêter les saignements et réduire le risque hémorragique, grâce à la compression sur les trous d'aiguille, agissant également comme une barrière contre le risque d'infections.

La couche non adhérente et biocompatible du tampon n'adhère pas à la peau, **ce qui évite le retrait du caillot et le risque de saignement.**



Bandage pour fistule

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Déroulez la première partie du bandage contenant le tampon.
2. Mettez le tampon sur le site de l'aiguille.
3. Serrez suffisamment le bandage pour arrêter le saignement.
4. Retirez le film protecteur et fixez le bandage avec l'adhésif.



RÉFÉRENCES

NO ART.	BANDAGE			TAMPON	PCS / SACHET	SACHETS / CARTON
	Couleur	Longueur totale cm	Hauteur cm	Mesure cm		
S0029	BLANC	50±10%	6	Ø 2,6	1	500
S0030	BLANC			Ø 2,6	2	300

CLASSIFICATION • CE0373 DISPOSITIF MÉDICAL
STÉRILISATION • RAYONS GAMMA