



EMODIAL®

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com

fm

forni medical gmbh

Produits pour Hôpitaux et Médecins

Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | info@fornimedical.ch
www.fornimedical.ch

Ref. FR001-FM Rev.07/2019



EMODIAL®

DIAFIX®

Dispositif pour fistule



DIAFIX[®]

DESCRIPTION

Le dispositif de sangle est disponible en deux modèles différents: avec ou sans tampon absorbant.

INDICATIONS

Action hémostatique compressive, spécifique aux soins de l'accès artérioveineux post-dialyse, à utiliser après le retrait des aiguilles de la fistule.

Convient également aux patients qui ont besoin d'un traitement intraveineux et de transfusions sanguines.

OBJECTIF

Conçu pour:

- Arrêter les saignements et diminuer le risque hémorragique grâce à la compression sur les trous des aiguilles.
- Diminuer l'apparition de complications au niveau de l'accès vasculaire causées par le saignement sous-cutané qui pourrait favoriser le développement de caillots sanguins intravasculaires.
- Empêcher la fistule de s'occlure en raison d'une compression immuable.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION



1 Placez un tampon sur le site de l'aiguille et maintenez-le en place avec le pouce.



2 Serrez la sangle.

3 Retirer l'aiguille.



4 Ajustez la tension de la sangle pour obtenir une compression optimale de la fistule et pour arrêter les saignements.

5 Retirez le dispositif dès que l'hémostase est obtenue.

6 Répétez les procédures pour le pansement de la deuxième fistule.

RÉFÉRENCES

NO ART.	SANGLE			TAMPON	PCS/ SACHET	SACHETS/ CARTON
	COULEUR	Long. Tot. cm	Hauteur cm	Mesures cm		
S0040/B	VERT	36	2	∅ 2,6	1	200
B0088/N/VDN	VERT			NO	EN VRAC	500

CLASSIFICATION • NO ART. S0040/B: CE0373 DISPOSITIF MÉDICAL

• NO ART. B0088/N/VND: CE DISPOSITIF MÉDICAL

STÉRILISATION • NO ART. S0040/B: RAYONS GAMMA

• NO ART. B0088/N/VND: NON STÉRILE



• USAGE UNIQUE