



**EMODIAL®**

Via Finati, 4-4A - Ferrara (ITALY)  
Tel. (+39) 0532 978198 - Fax (+39) 0532 978414  
[www.emodial.com](http://www.emodial.com) - [info@emodial.com](mailto:info@emodial.com)

*fm*

Importer & CH-REP:  
**forni medical gmbh**

Produits pour Hôpitaux et Médecins

Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf  
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | [info@fornimedical.ch](mailto:info@fornimedical.ch)  
[www.fornimedical.ch](http://www.fornimedical.ch)

Ref. FR003-FM Rev. 07/2019



**EMODIAL®**

**EMOSTAN®**

**Tampon pour fistule**



# EMOSTAN®

## DESCRIPTION

**EMOSTAN®** est un tampon hautement absorbant à action hémostatique compressive, spécifique aux soins des accès artériovoineux post-dialyse, à utiliser après le retrait des aiguilles à fistule.

Convient également aux patients qui ont besoin d'un traitement intraveineux et d'une transfusion sanguine.


## UTILISATION PRÉVUE

Pansement post-dialyse pour arrêter le saignement après le retrait des aiguilles de la fistule.

## OBJECTIF D'UTILISATION

Conçu pour arrêter les saignements et réduire le risque hémorragique, grâce à la compression des trous d'aiguille, et pour agir comme une barrière contre le risque d'infection.

La couche non adhérente et biocompatible du tampon n'adhère pas à la peau et **garantit un retrait non traumatique**.

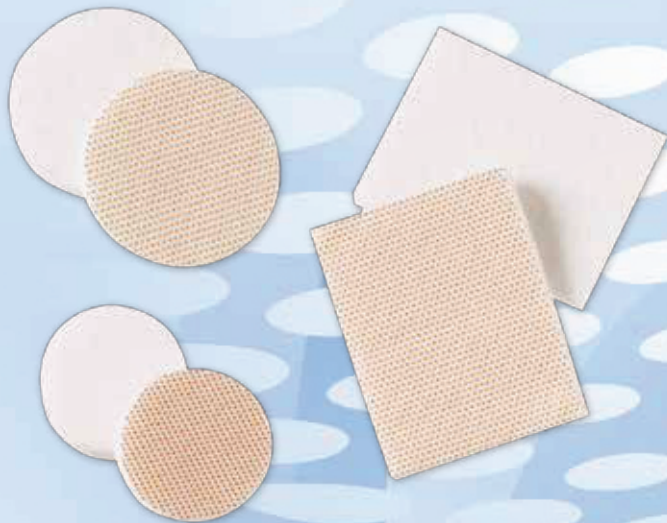

## TAMPON POUR FISTULE

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Placez le tampon sur le site de l'aiguille et maintenez-le en place avec le pouce.



- 2 Retirez l'aiguille et appuyez pendant un temps approprié pour arrêter le saignement.



## RÉFÉRENCES

CODE			PCS/ SACHET	SACHETS/ CARTON
	Dimension cm	Épaisseur mm		
S0210	Ø 2,6	0,7±10%	2	500
S0211	Ø 3,5		2	500
S0212	3,5 X 4,5		2	300

CLASSIFICATION CE0373 DISPOSITIF MÉDICAL  
STÉRILISATION RAYONS GAMMA