



EMODIAL®

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com

Importer & CH-REP:

fm **forni medical gmbh**
Produits pour Hôpitaux et Médecins

Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | info@fornimedical.ch
www.fornimedical.ch



Ref. FR004-FM Rev. 07/2019



EMODIAL®

SOVAN®

Pansement pour fistule



SOVAN®

DESCRIPTION

SOVAN est un tampon hémostatique à deux couches hautement absorbant, fixé sur un adhésif hypoallergénique et perméable à l'air. Convient également aux patients qui ont besoin d'un traitement intraveineux et d'une transfusion sanguine.

UTILISATION PRÉVUE

Action hémostatique compressive, spécifique pour le soin des accès artériovoineux post dialyse. A utiliser pour l'hémostase après le retrait des aiguilles de fistule.

OBJECTIF D'UTILISATION

Conçu pour arrêter les saignements et réduire le risque hémorragique, grâce à la compression sur les trous d'aiguille, agissant également comme une barrière contre le risque d'infections. La couche non adhérente et biocompatible du tampon n'adhère pas à la peau, **ce qui évite le retrait du caillot et le risque de nouveau saignement.**

L'adhésif permet de maintenir le tampon en place.



Pansement pour fistule

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1** Retirez le papier de protection et fixez la première moitié du pansement sur la peau.
- 2** Placez le tampon sur le site de l'aiguille, appuyez et retirez l'aiguille.
- 3** Retirez la seconde moitié du papier et fixez fermement l'autre moitié du pansement sur la peau. Maintenir en place jusqu'à ce que l'hémostase soit obtenue.



RÉFÉRENCES

Les données et les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

NO ART.	PANSEMENT	TAMPON	PCS/ SACHET	SACHETS/ CARTON
	cm	cm		
S0074	15 x 5	Ø 2,6	1	500
S0075			2	500
S0079	10 x 5		2	500

CLASSIFICATION • CE0373 DISPOSITIF MÉDICAL
STÉRILISATION • RAYONS GAMMA